

# SONODYN


*La chaîne d'asepsie automatisée*

## LAVEUR- DÉSINFECTEUR

DESTINÉ AU NETTOYAGE DES INSTRUMENTS MÉDICO - CHIRURGICAUX  
ET DES P.I.R. (PORTE-INSTRUMENTS ROTATIFS)



**Laveur-Désinfecteur**  
**EN ISO 15883-1**  
(Dispositif Médical Classe IIb)

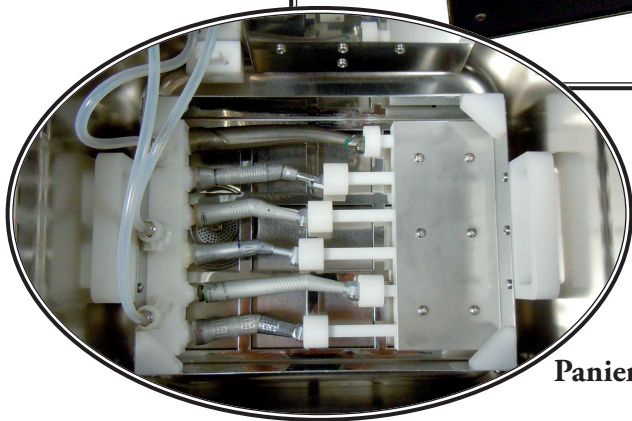

Panier P.I.R.


**SONODYN 17- E**  
Contenance :  
1 panier P12  
ou 2 paniers P3

**GAMASONIC**

# TABLEAU DE COMMANDE

VOYANTS de SIGNALISATION des FONCTIONS

COMMUTATEURS de COMMANDE

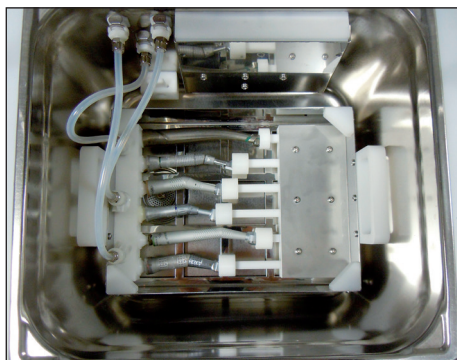

SONODYN 17-E avec panier P.I.R.



SONODYN 17-E  
Contenance : 1 panier P12  
ou 2 paniers P3



SONODYN 17-EK7  
Contenance : 1 panier porte-cassette PC17  
ou 1 panier P12 ou 2 paniers P3

## FONCTIONNEMENT

### CYCLES PRÉ-DÉSINFECTION Paniers/Cassettes (sur version "K7")

- ▶ Remplissage en eau avec dosage du produit DETERBAKT®

### CYCLES AUTOMATIQUES PANIERS Paniers/Cassettes (sur version "K7")

- ▶ Rinçage en eau claire sous ultrasons
- ▶ Nettoyage sous ultrasons avec le produit PROCLEAN
- ▶ Rinçage en eau claire sous ultrasons
- ▶ Rinçage en eau claire sous ultrasons avec le produit DPH21
- ▶ Séchage par air chaud avec média-filtrant

### CYCLES MANUELS : 4 Fonctions distinctes pré-programmées

- ▶ Remplissage en eau claire
- ▶ Mise en service temporisée des ultrasons
- ▶ Vidange temporisée de la cuve
- ▶ Mise en service temporisée du séchage

N.B. Ces fonctions manuelles permettent de retrouver toutes les étapes de la chaîne d'asepsie manuelle.

### CYCLE DYNASEPT® : Durée totale du cycle ~ 35 mn

SONODYN 17.E / SONODYN 17.EK7 (capacité de 6 instruments)

SONODYN 30.E / SONODYN 30.EK7 (capacité de 12 instruments)

- ▶ Positionner les P.I.R. dans le panier et connecter les 3 raccords rapides
- ▶ Lancement du cycle « CYCLE DYNASEPT® »
- ▶ Rinçage en eau claire sous ultrasons avec irrigation intermittente
- ▶ Remplissage en eau claire et dosage du produit DX25
- ▶ Fonctionnement intermittent des ultrasons et de l'irrigation (15')
- ▶ Rinçage en eau claire sous ultrasons avec irrigation intermittente
- ▶ Rinçage en eau claire et dosage du produit DPH21 sous ultrasons avec irrigation intermittente
- ▶ Séchage par air comprimé et par ventilation (séchage interne + externe des P.I.R.)
- ▶ Retirer le panier P.I.R. de la cuve
- ▶ Nettoyer le filtre d'irrigation présent à l'intérieur de la cuve

### INSTALLATION DE L'APPAREIL : (voir documents techniques)

Son fonctionnement nécessite une alimentation électrique de 220V avec terre, une vidange type « machine à laver » et une arrivée d'eau du réseau raccordée sur un robinet type machine à laver (20/27). Une arrivée en air comprimé d'une valeur de 6 bars avec air filtré sur détendeur est nécessaire.

Les bidons de produits sont raccordés et entreposés sous l'appareil. Le niveau de produit des bidons est visualisé sur le tableau de commande.

Poids de l'appareil SONODYN17-E	: 28 kg
SONODYN17-EK7	: 32 kg
SONODYN30-E	: 38 kg
SONODYN30-EK7	: 40 kg

L'appareil SONODYN ne se substitue pas à une stérilisation des instruments après leur nettoyage.

Ce dispositif médical est à usage professionnel.

Il ne doit pas être utilisé dans des zones accessibles aux patients.

EN FIN DE MISE EN SERVICE, LAISSER L'APPAREIL EN ÉTAT DE PROPRETÉ  
(cuve rincée et essuyée - capot propre)



Document non contractuel. Nous nous réservons le droit de modifier nos appareils dans le souci de toujours mieux servir notre clientèle.  
GAMASONIC - BP 52 - Z.A.C. de l'Angaud - 63160 BILLOM - France - Tél. 04 73 68 90 26 - Fax 04 73 68 97 43

- Fabricant Français -