



GREEN&CLEAN M2

Désinfection du système d'aspiration

GREEN&CLEAN M2



1 Appuyer deux fois sur la pompe doseuse (= 6 ml de concentré)



2 Remplir le bac mélangeur avec de l'eau froide jusqu'au tiret (= 600 ml solution à 1%)



3 Positionner la petite canule sur le petit orifice n°1 jusqu'à entendre un bruit d'air



4 Positionner la grosse canule sur le grand orifice n°2 jusqu'à entendre un bruit d'air



5 Verser la solution restante dans le crachoir

Désinfection avec GREEN&CLEAN M2:

- 2 fois/jour (midi et soir) et après toute intervention chirurgicale
- aspirer de l'eau froide après tout traitement
- alterner les couleurs au terme des 83 utilisations (= 1 bouteille)
- porter des gants de protection
- respecter le dosage

GREEN&CLEAN M2: Désinfection du système d'aspiration

(crachoir, récupérateurs d'amalgame, séparateurs air-eau)

- système dual (rouge/vert) actif contre résistance
- HBV/HIV/HCV, bactéricide/fongicide (*C. albicans*), tuberculocide
- très concentré et facile à doser
- excellente désodorisation et solubilité des protéines
- effet anti-mousse
- listé DGHM/VAH, CE-0044