


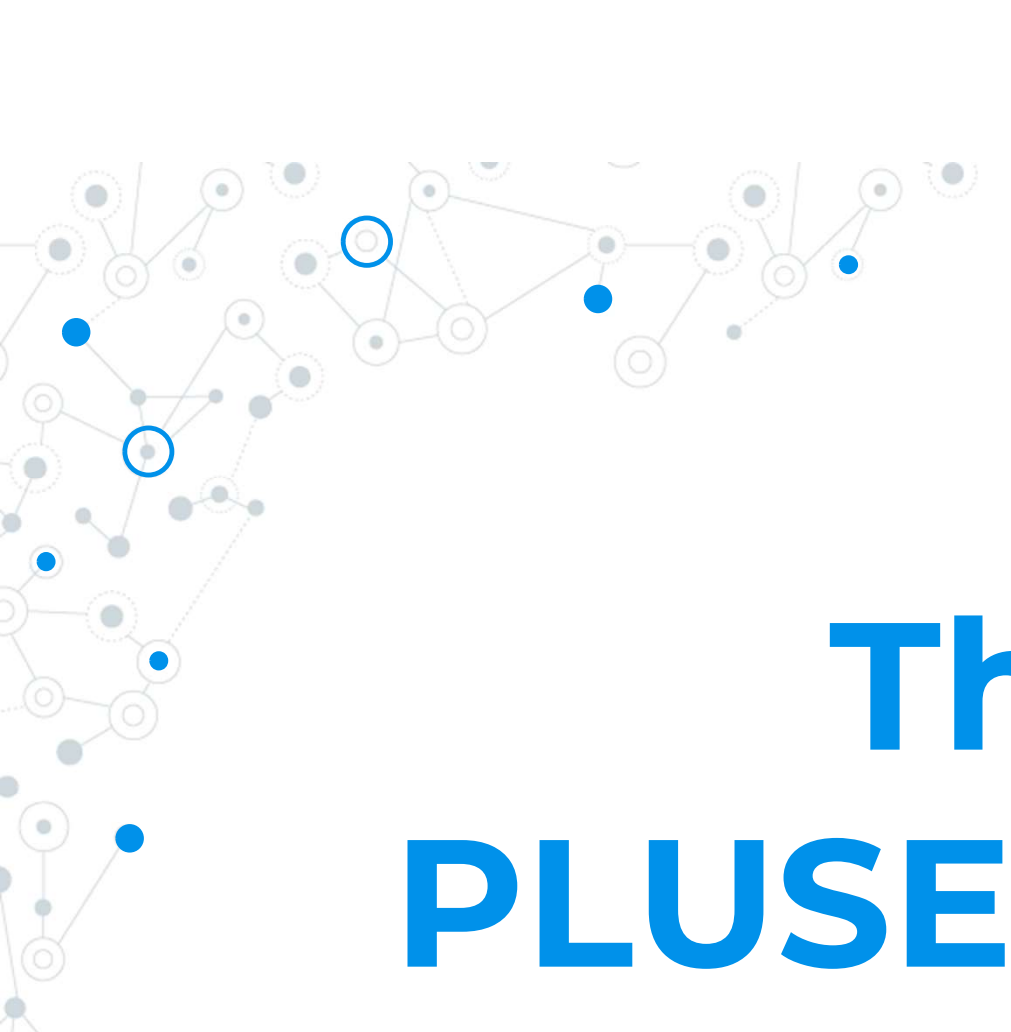

This is **PLUSER KOMBI**





CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- ❖ LOGICIEL BASÉ SUR ANDROID + WIFI Direct
- ❖ LASER ERBIUM + LASER DIODE
- ❖ GAMME COMPLÈTE DE PIÈCES À MAIN
- ❖ PROTOCOLES CLINIQUES INTÉGRÉS
- ❖ SYSTÈME DE GUIDE DE LA FIBRE
- ❖ SOLUTION MAGIC ARM
- ❖ PROTOCOLES DERMATOLOGIQUES
(Tiers moyen inférieur du visage)

THÉRAPIE LASER À 360°



Pluser Kombi est la station de travail la plus avancée de tous les temps. Avec **un seul outil**, vous pouvez offrir la meilleure thérapie assistée par laser à vos patients, sans besoin de **changer les pièces à main**.

Avec Pluser, vous fusionnez l'excellence clinique et la rapidité d'exécution.

ATTEINDRE DE NOUVEAUX OBJECTIFS

Tous les protocoles sont bien visibles sur l'écran tactile.

Grâce aux icônes graphiques, le fonctionnement n'a jamais été aussi intuitif, immédiat et efficace.



FACILE À UTILISER


DOMAINE CLINIQUE

MENU EN DÉFILEMENT

ICÔNES GRAPHIQUES

PARAMÈTRES DE
FONCTIONNEMENT

ENCYCLOPÉDIE DES
TRAITEMENTS

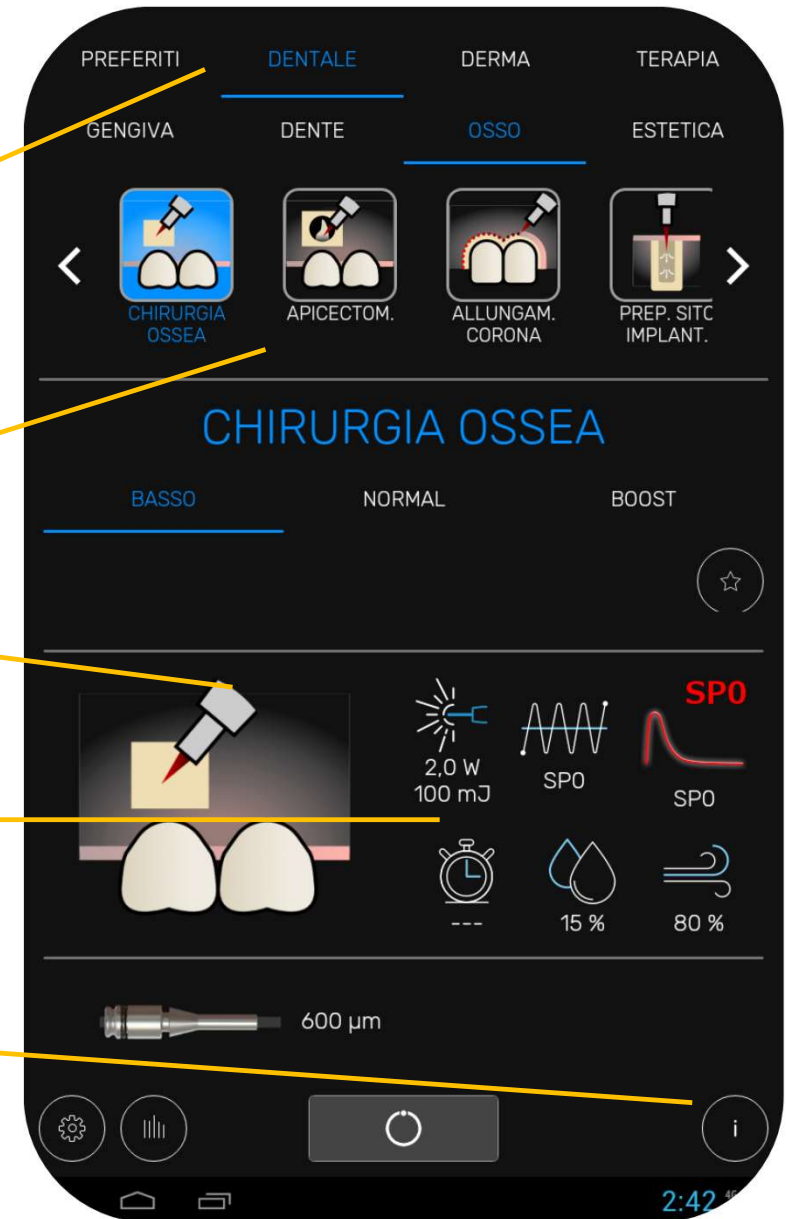

TECHNOLOGIE ET INNOVATION À VOS CÔTÉS

- ❖ Mises à jour téléchargeables
- ❖ Diagnostic à distance
- ❖ Indicateurs d'utilisation



Pluser s'adapte parfaitement à l'agenda du cabinet, devenant un allié clinique et opératoire

LASER DIODE INTÉGRÉ

La combinaison de l'erbium et du laser à diode permet d'intervenir efficacement dans tous les domaines de la dentisterie.

Pluser Kombi est le dispositif médical pour la dentisterie mini-invasive qui fait la différence.



LASER DIODE INTÉGRÉ

Le passage du protocole erbium au protocole diode est très facile : d'une simple pression le dentiste est prêt à opérer sans aucune perte de temps.



DE NOMBREUSES THÉRAPIES AVEC 1 SEUL OUTIL

TISSUS DURS

Élimination des caries
Préparation de la cavité I/V
Mordançage
Retrait des composites
Scellement des puits
Désensibilisation
Dépose des facettes
et des couronnes

DERMATOLOGIE

(Tiers moyen inférieur du visage)
Resurfacing
Chirurgie dermatologique
Dépigmentation de la peau
Bioregénération du derme

THÉRAPIE

Parodontite
Peri-implante
Photobiomodulation
Effet antalgique
Hémostase

TISSUS MOUS

Chirurgie
Frénectomie
Dégagement implant
Péri-implantite
Aménagement du tissu
Dépigmentation gingival

CHIRURGIE OSSEUSE

Split Crest
Élévation du plancher sinusien
Préparation du site Implantaire
Allongement de couronne
Résection apicale
Grefe osseuse

PIÈCES À MAIN

PLUSER KOMBI

Kit complet avec différents angles et pièce à main Boost pour une puissance laser maximale.

Kit de tips en saphir inclus.



PIÈCES À MAIN BOOST

Pour opérer à puissance maximale



PIÈCES À MAIN 90°

Pièces à main avec différentes inclinaisons et insertion pratique de tips

PIÈCES À MAIN DROITE



PIÈCES À MAIN

PLUSER KOMBI

Grâce au laser diode, Pluser Kombi élargit la gamme des thérapies proposées aux patients, ce qui en fait le meilleur allié du cabinet.

Avec la pièce à main diode et la pièce à main exclusive Flat Top, il est possible d'effectuer des traitements de parodontie, de photobiomodulation et d'hémostase.



PIÈCES À MAIN DIODE

Hémostase, parodontie,
peri-implantite

PIÈCES À MAIN FLAT TOP

Effet antalgique et
photobiomodulation

PIÈCES À MAIN

PLUSER KOMBI **DERMA**

Les protocoles dermatologiques intégrables permettent d'intervenir dans l'ablation des lésions du derme et dans le traitement de resurfaçage non ablatif.

PIÈCES À MAIN FULL-FIELD



PIÈCES À MAIN FRACTIONNÉE



Entrambi i manipoli sono dotati di distanziale per migliore gestione dello spot di irradiazione



ENCYCLOPÉDIE MÉDICAL

Grâce aux infocliniques intégrées, les protocoles sont décrits permettant ainsi une connaissance approfondie de la dentisterie laser.

Appuyez sur le bouton « i » et faites de Pluser votre assistant laser



FLAP PREPARATION

FLAP SURGERY



Procedure:

the 2940nm wavelength has a high absorption peak in tissue that is rich in water, such as the gum. The interaction between the tissue and the beam yields a very precise and painless incision. In most cases anaesthetic is not necessary.

The procedure requires the use of the laser set at 1,5W power (can be increased), 60% water and 80% air. The laser will operate a quick and painless cut. For a better coagulative effect decrease the water setting to 20%. If using the optional handpiece with tips use the H4/8. Ablate the detached part of the flap in slight contact with a sapphire tip.

If available, once the detachment has occurred, use the laser diode at 2W for ten seconds to decontaminate and coagulate the entire area.

DESIGN ET SCIENCE ENTRE VOS MAINS

L'ergonomie de Pluser Kombi a été améliorée.

Avec le système **Magic Arm Solution**, les opérations sont réalisées avec un maximum de confort pour le patient et avec la meilleure position pour le praticien.



LE SECRET EST DANS L'ONDE

Pluser Kombi avec sa fibre optique
« **No break** » garantit un haut rendement et une fiabilité dans le temps, sans perte de puissance et avec une maintenance facile.




Le changement des pièces à main se fait en quelques secondes grâce au système « **easy-click** » développé par nos laboratoires.

CONTRÔLEZ VOS PERFORMANCES

RAPPORT D'ANALYSE INTÉGRÉ

Pluser enregistre les protocoles exécutés, générant un **graphique** qui montre l'utilisation de l'appareil.

Un excellent moyen d'évaluer comment et combien le laser est utilisé pour **un retour rapide sur investissement**.

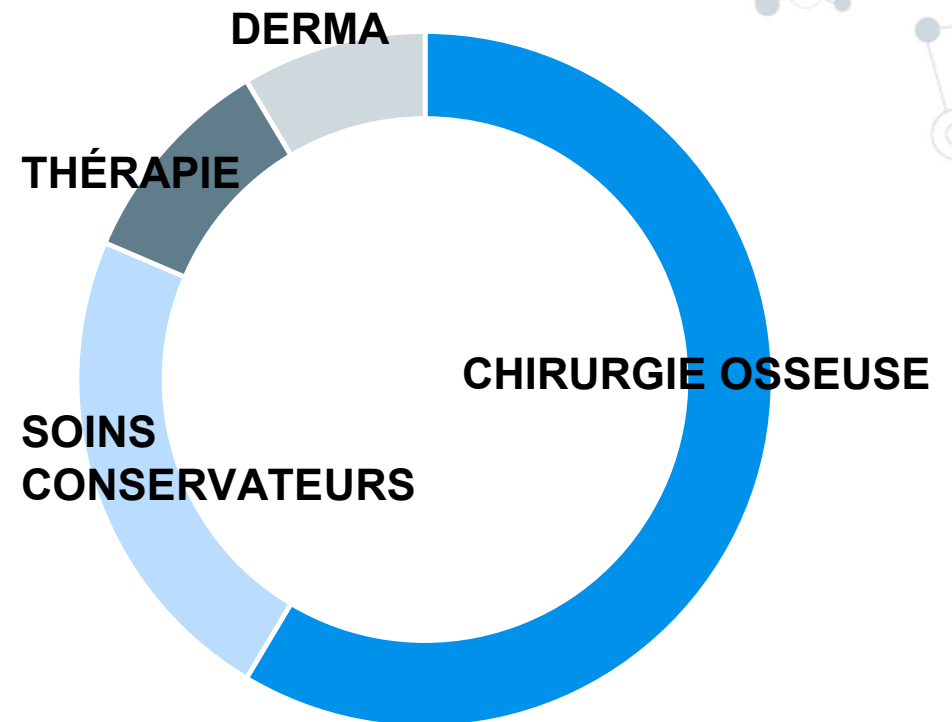

PLUSER KOMBI À 360°

CLINIQUE

- Efficace sur tous les tissus
- Mini invasif
- Aucune infections croisées



TECHNOLOGIE

- 12W de puissance
- Grand Écran Tactile
 - Pédale sans fil



OPPORTUNITÉS

- Nouveaux traitements
- ROI (Retour sur Investissement)
- Valeur et fidélité



DESIGN

- 100% Made in Italy
 - Élégant et discret
- Expérience utilisateur intuitive





DOCTOR
SMILE

INNOVATION HAS A NAME