

CONSEILS POUR LE REMPLACEMENT D'UNE CARTOUCHE MULTIDEM C27



Éteindre le ou les stérilisateur(s) sur le bouton principal.
Procéder à la purge du réservoir d'eau propre sur le raccord bleu et blanc.

Tourner les poignées vertes de verrouillage sur la tête du Multidem pour atteindre la butée.



Purger la cartouche, mettre le tuyau dans un récipient et appuyer sur le bouton gris clair, un résidu d'eau sortira par le tuyau.

Retirer la tête et le socle de l'ancienne cartouche.



Enlever le capuchon de couleur sur la nouvelle cartouche.

Mettre en place la tête du Multidem sur la cartouche. Tourner les poignées vertes jusqu'à la moitié pour que l'eau rentre en douceur, puis les verrouiller complètement.



Chasser le résidu d'air présent dans la cartouche, en appuyant sur le bouton gris clair à plusieurs reprises jusqu'à ce que de l'eau sorte du tuyau.

Rallumer le ou les stérilisateur(s) pour que le réservoir se remplisse.
Ne pas tenir compte du message de qualité, si le message persiste attendre 3 à 5 cycles avant de prendre contact avec le service technique.

