

# SNC Digital

*La chaîne d'asepsie automatisée*

## LAVEUR- DÉSINFECTEUR

DESTINÉ AU NETTOYAGE DES INSTRUMENTS MÉDICO - CHIRURGICAUX



**Laveur-Désinfecteur**  
**EN ISO 15883-1**  
(Dispositif Médical Classe IIb)



**SNC 17ED**  
Contenance :  
1 panier P12  
ou 2 paniers P3

**GAMASONIC**

# PUPITRE DE COMMANDE

VOYANTS de SIGNALISATION des FONCTIONS (Manuelles ou Automatiques)

TOUCHES de COMMANDE

|                   |                  |  |                 |                   |
|-------------------|------------------|--|-----------------|-------------------|
| MISE SOUS TENSION | NIVEAU DÉTERBAKT | <p>SNC 17</p> <p><i>Digital</i></p>  <p>GAMASONIC</p> | REMPLISSAGE EAU | PRÉDÉSINFECTION   |
| ULTRASONS         | NIVEAU PROCLEAN  |  | ULTRASONS       |                   |
| DOSAGE PRODUITS   | NIVEAU DPH21     |  | VIDANGE         | CYCLE AUTOMATIQUE |
| SÉCHAGE           | NIVEAU EAU       |  | SÉCHAGE         |                   |
| FIN DE CYCLE      | DÉFAUT ULTRASONS |  |                 |                   |



### SNC 17-ED

Contenance : 1 panier P12  
ou 2 paniers P3



### SNC 17-EDK7

Contenance : 1 panier porte-cassette PC17  
ou 1 panier P12 ou 2 paniers P3



### SNC 30-EDK7

Contenance : 2 paniers P12  
ou 2 paniers porte-cassette PC17  
(ou mixage : 1xPC17 + 2xP12)

## FONCTIONNEMENT

### CYCLES PRÉ-DÉSINFECTION *Paniers/Cassettes (sur version "K7")*

- ▶ Remplissage en eau avec dosage du produit DETERBAKT®

### CYCLES AUTOMATIQUES PANIERS *Paniers/Cassettes (sur version "K7")*

- ▶ Rinçage en eau claire sous ultrasons
- ▶ Nettoyage sous ultrasons avec le produit PROCLEAN
- ▶ Rinçage en eau claire sous ultrasons
- ▶ Rinçage en eau claire sous ultrasons avec le produit DPH21
- ▶ Séchage par air chaud avec média-filtrant

### CYCLES MANUELS : 4 Fonctions distinctes pré-programmées

- ▶ Remplissage en eau claire
- ▶ Mise en service temporisée des ultrasons
- ▶ Vidange temporisée de la cuve
- ▶ Mise en service temporisée du séchage

N.B. Ces fonctions manuelles permettent de retrouver toutes les étapes de la chaîne d'asepsie manuelle.

### INSTALLATION DE L'APPAREIL : *(voir documents techniques)*

Son fonctionnement nécessite une alimentation électrique de 230V avec terre, une vidange type « machine à laver » et une arrivée d'eau du réseau raccordée sur un robinet type machine à laver (20/27).

Les bidons de produits sont raccordés et entreposés sous l'appareil.

Le niveau de produit des bidons est visualisé sur le tableau de commande.

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Poids de l'appareil SNC17-ED | : 27 kg |
| SNC17-EDK7                   | : 30 kg |
| SNC30-ED                     | : 36 kg |
| SNC30-EDK7                   | : 39 kg |

**L'appareil SNC DIGITAL ne se substitue pas à une stérilisation des instruments après leur nettoyage.**

**Ce dispositif médical est à usage professionnel.**

**Il ne doit pas être utilisé dans des zones accessibles aux patients.**

**EN FIN DE MISE EN SERVICE, LAISSR L'APPAREIL EN ÉTAT DE PROPRETÉ**  
(cuve rincée et essuyée - capot propre)

CE 1282



Document non contractuel. Nous nous réservons le droit de modifier nos appareils dans le souci de toujours mieux servir notre clientèle.  
GAMASONIC - BP 52 - Z.A.C. de l'Angaud - 63160 BILLOM - France - Tél. 04 73 68 90 26 - Fax 04 73 68 97 43

- Fabricant Français -