



UnicLine[®]

Top ergonomie gecombineerd met uw individuele wensen uw eigen werkpaand

Ideaal i.v.m. reiniging door assistente geen belemmering bij de voorruitstap uit de behandelstoel.
Ook leverbaar met afzuig vanuit midden zowel links en rechts handig gebruik.



2



Instrumentenbrug zowel over links als over rechts weg te zetten na behandeling



3

Volledige sturing - met de voet

Het unieke, gepatenteerde ronde voetpedaal kan geactiveerd worden vanuit elke positie, zowel met de rechter als met de linker voet. Hij pikt u niet vast op één bepaalde werkhouding. Met de voetpedaal regelt u de snelheid activeert u de preselectie toerentallen van de gekozen instrumenten. Door het aantikken van de middelste ring op de voetpedaal activeert u de spray-functie en de mechanische chip-blow, en wisselt u de draairichting van de micro-motor.


Door een druk op de top van de voetpedaal bedient u de operatielamp of roept u uw assistente.



UnicLine kan ook geleverd worden met een conventionele, of variabele voetpedaal.



Laat de mogelijkheden open - elke dag

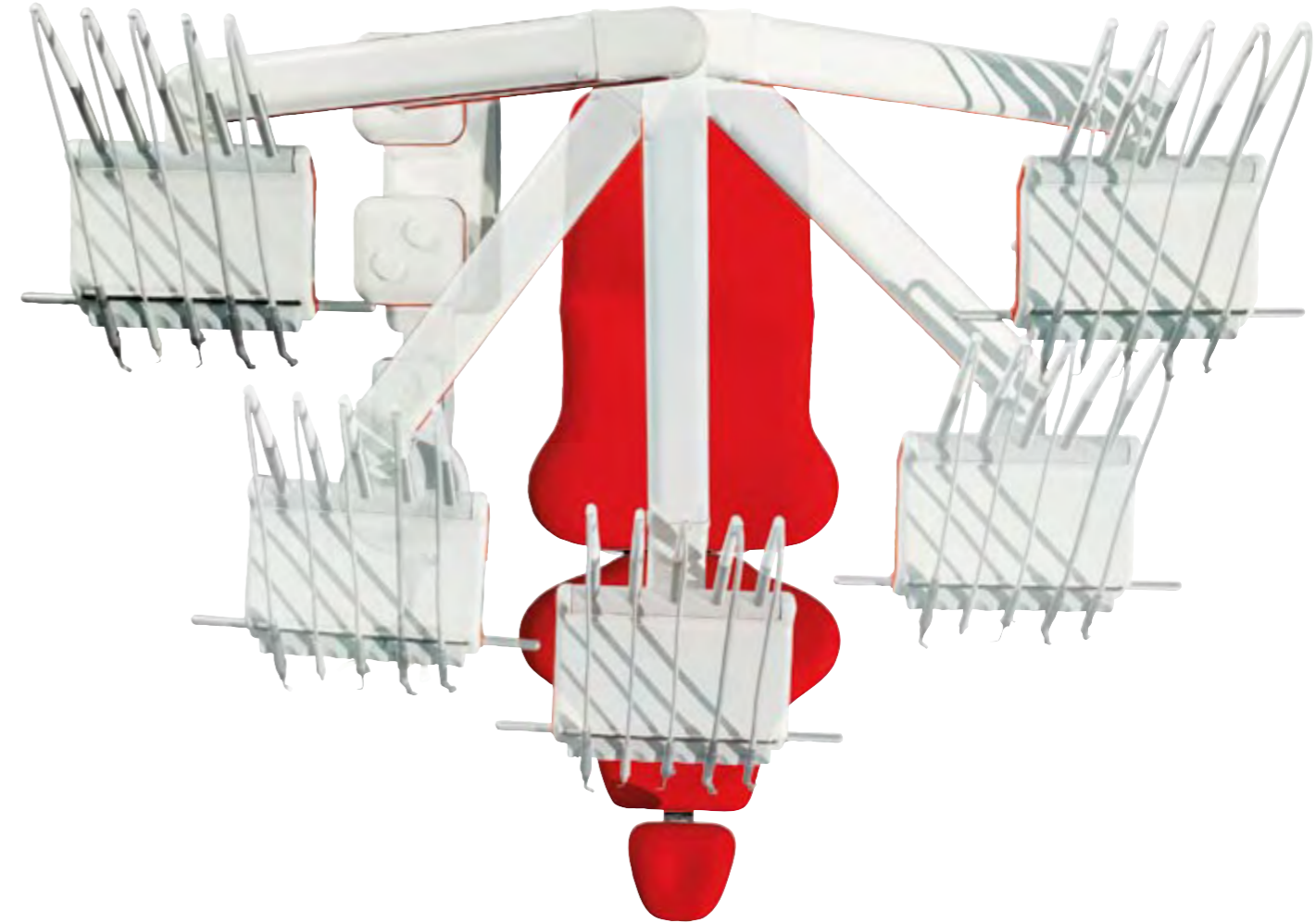



Overzicht

Een overzichtelijk display geeft duidelijk alle informatie over uw instelling van het instrumentarium.

Een brede waaier van mogelijkheden

De UnicLine D kan geleverd worden met 3 tot 6 uitgebalanceerde zweep-instrumenten of met 3 tot 6 hangende slangen, individueel geplaatst op de instrumentenbrug. U heeft de keuze uit meer dan 20 verschillende instrumenten, die allen met de voetpedaal bediend kunnen worden.

Individuele instelling

De hoek van de instrumentenhouder kan individueel ingesteld worden voor elk instrument.

Met de vingertop

De druktoetsen aan de zijkant van de instrumentenbrug bedienen de tijdsinstelling, de tijdsduur van de composietlamp, de assistenteoproep en de spittoonfuncties. Bovendien kan u de micro-motor testen.



Ergonomie

Op de uitvoering met individueel uitgebalanceerde zwepen is ieder instrument perfect in balans en de extra lange silicone slangen verzekeren ergonomisch correcte werkhoudingen.

Ieder van ons heeft eigen ideeën en wensen. Flexibiliteit betekent onder andere aanpassing. Daarom kan iedere unit aangepast worden aan de wensen van de individuele tandarts





Doorspoelsysteem
Alle spraykanalen kunnen automatisch worden gereinigd.

Hygienic airrotation systeem
De unit kan volledig worden drooggeblazen in alle waterkanalen ter voorkoming van kalkaanslag, algen verstopping en legionella verspreiding.


De aluminium handgrepen kunnen gemakkelijk verwijderd worden om te autoklaveren.



De rubberen instrumenten-houder kan gemakkelijk worden weggenomen voor reiniging.



UnicLine 5D
- met enkele tray.
- met dubbele tray.

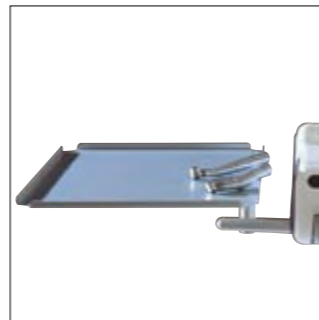

Waarom een compromis aangaan wat betreft de materiaalkeuze als u kan kiezen voor een unit uit aluminium - de zekerheid van een levenslange kwaliteit



UnicLine multimedia
UnicLine 5D met monitor
voor intra orale beelden,
digitale röntgenfoto's, video
of andere IT-media.



Flexibiliteit betekent onder
andere aanpassing



10



11



12

UnicLine 5D
- een elegant,
functioneel en
tijdloos design
met aandacht
voor het
milieu



13



14

UnicLine 5D kan voor een linkshandige aangepast worden

Laat de mogelijkheden
open elke dag.
Ook levenbaar met afzuig
in het midden onder de
Rugleuning in verband met
links/rechtshandig gebruik.



15



Licht met
ingebouwde
stabiliteit



De UnicLine operatielamp
type Edi gemonteerd op
een zelf-balancerende
veerarm geeft een perfect
operatielicht en verzekert
een stabiele positie.

16

Vrije opstelling

UnicLine Cart

De cart-versie heeft dezelfde functies als de UnicLine 5D unit en is gebouwd op een solide aluminium profiel met verborgen wielen.

De werkhogte van de instrumententafel kan manueel ingesteld worden voor zowel zittend als staand werken.



UnicLine Cart



Spoeleenheid

De stoeladapter voor de UnicLine patiëntenzetel kan uitgerust worden met een draaibare spoelkom met afzuiging, een extra tray, een operatielamp en een telescopische arm.



UnicLine Paal


17

Hygiëne voor de patiënt

UnicLine 5D is beschikbaar met een uniek reinigingssysteem voor de afzuigslangen, dat geactiveerd wordt door het indrukken van een druktoets op de afzuigarm. Hierdoor worden de afzuigslangen gedesinfecteerd opdat onmiddellijk een volgende patiënt behandeld kan worden. Tijdens de behandeling kunnen de afzuigslangen ook continu gedesinfecteerd worden.




UnicLine 5D wordt geleverd met ofwel regelbare afzuigcanules of met hygiënische aluminium afzuigcanules.

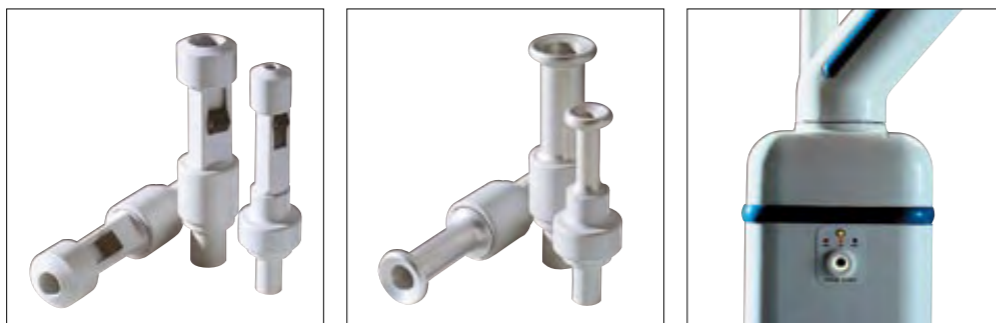

Flexibiliteit

UnicLine 5D wordt geleverd met een flexibele, telescopische arm die ingesteld kan worden naar uw ideale werkpositie, zowel voor werken met assistente als zonder assistente. Op de telescopische arm kan een functiespuit of polymerisatielamp gemonteerd worden.

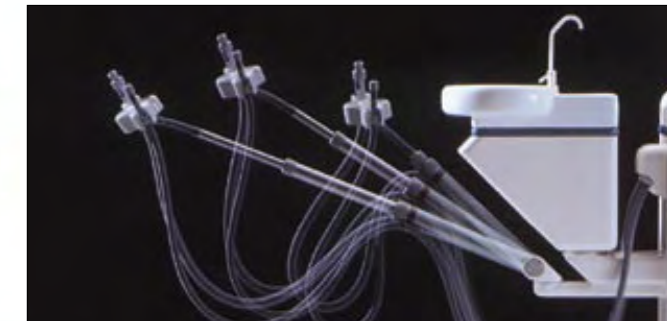

Comfort

De spittoonschaal draait 90° naar elke kant en kan gemakkelijk afgenomen worden voor een grondige reiniging.





Armsteunen

Optioneel kan de UnicLine patiëntenstoel geleverd worden met één of twee armsteunen.



Joystick

De individueel gepositioneerde 'joy sticks' (1, 2 of 3) verzekeren u en uw assistente van een ideale werkpositie.



Makkelijk schoon te maken

De bekleding van de UnicLine is makkelijk te verwijderen om schoon te maken.

Keuze vrijheid



De UnicLine patiëntenstoel is leverbaar met zachte bekleding in 9 verschillende standaard kleuren en met een optie voor extra zachte bekleding in 4 verschillende kleuren.

Comfort voor de patiënt

De compenserende bewegingen van rugsteun en zitvlak en de aangebouwde armsteun verzekeren een comfortabele zithouding voor de patiënt gedurende de hele behandeling.



Stabiele positie

De dubbel gearticuleerde neksteun verbetert de positionering van het hoofd, zowel bij volwassenen als bij kinderen.





UnicLine Mobile - complete behandelplek

Compleet uitgevoerd voor zowel
een mobiele behandelplek als voor
een definitieve behandelplek.

Instrumenten met 2 motoren,
3-functiespuit en polymerisatielamp.
De unit beschikt over een amalgaamscheider
compressor en opvang-tank voor de afzuiging,
alleen 220V aansluiting nodig.



22

Unit, Instrumententablet, OP-Lamp, Patientenstoel en Röntgen



23

heka*dental*[®]



Heka Dental A/S
Baldershøj 38
DK-2635 Ishøj
Telefon +45 4332 0990
Fax +45 4332 0980
mail@heka-dental.dk
www.heka-dental.com

Kommunikator 23735 9/08 H0L

En nu

Neem contact op met uw dealer. Hij zal u graag mogelijkheden van de UnicLine 5D laten ontdekken.

Technische veranderingen
kleurveranderingen
en drukfouten onder
voorbehoud.

